

### INDIKACE

Prevence a léčba cervikálních lézí, které způsobuje lidský papilomavirus, úpravou fyziologického prostředí transformační zóny cervikovaginální sliznice.

### POPIŠ

**Colpofix®** je přípravek s inovativním složením a způsobem použití. Jedná se o gel s tixotropními vlastnostmi, který se působením mechanické komprese při aplikaci mění na tekutinu a po aplikaci se opět vrací do formy gelu. Exkluzivní a ergonomický tvar aplikátoru umožňuje aplikovat mukoadhezivní přípravek rovnoměrně a účinně až do hloubky přímo na cervikovaginální sliznici bez zbytečného úniku.

**Colpofix®** obsahuje následující účinné látky: polykarbofil a karboxymethyl-beta-glukan. Účinnost přípravku **Colpofix®** v doporučených indikacích zajišťuje několik mechanismů účinku:

- tvorba tenké vrstvy, která prostřednictvím bioadheze chrání cervikovaginální sliznici před nežádoucím působením externích mikrobiálních agens
- podpora reepitelizace a regrese cervikálních lézí úpravou fyziologického prostředí cervikovaginální transformační zóny prostřednictvím hydratace
- obnova a zachování vaginálního mikrobiomu prostřednictvím úpravy pH a prebiotického účinku.

### SLOŽENÍ

Voda, sorbitol, karboxymethyl-beta-glukan, zesíťovaný akrylový polymer (polykarbofil), imidazolinylmočovina, dehydroacetát sodný.

### UPOZORNĚNÍ

Přítomné přírodní složky mohou vyvolat změnu barvy gelu, která ale nemá vliv na kvalitu přípravku. **Přípravek je určen k vaginálnímu použití. Nepolykejte.** Nepoužívejte přípravek bez doporučení lékaře nebo lékárníka, v případě potvrzeného nebo předpokládaného těhotenství nebo souběžně lokální farmakologické léčby. Přípravek není určen k pediatrickému použití. Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek může při dlouhodobém používání stejně jako všechny topické přípravky vést k místní přecitlivělosti nebo podráždění. V takovém případě léčbu ukončete a poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. Přípravek nepoužívejte, pokud je aplikátor poškozený nebo pokud není po rozbalení zcela netknutý. Přípravek nepoužívejte po datu ukončení použitelnosti. Přípravek použijte v souladu s návodem k použití. Kanyla je určena pro jednorázové použití, nelze ji používat opakovaně.

### UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte na suchém místě, chráňte před světlem a teplem. Vyzna-

čené datum použitelnosti platí pro nedotčený a správně uchovávaný výrobek.

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### Před použitím přípravkem netřepějte.

Vyjměte vaginální aplikátor z ochranného obalu. Sejměte víčko z trysky na lahvičce s gelem. Zasuňte aplikátor do trysky. Stisknutím dávkovacího tlačítka začnete z lahvičky vytlačovat gel. Počkejte, až se gel objeví na konci aplikátoru. V lehu na zádech s pokrčenými a roztáženými koleny zaveďte aplikátor hluboko do pochvy. Jedna dávka odpovídá pěti stříkům. Použitý aplikátor zlikvidujte. Nasadte na trysku víčko.

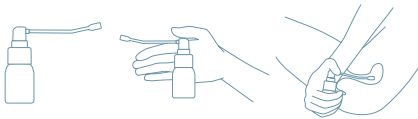

### DÁVKOVÁNÍ

Doporučuje se jedna dávka (5 stříků) denně po dobu 10 dnů večer před spankem.

V léčbě pokračujte podle doporučení lékaře.

Jedna lahvička obsahuje množství na 10 dnů.

### NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti nebo nesnášenlivosti některé složky přípravku nepoužívejte. Dosavadní testy výrobku neprokázaly žádné senzibilizační jevy ani jiné nežádoucí účinky. Při přetrvávajících potížích se poraďte s lékařem.

### BALENÍ

Balení obsahuje 20ml lahvičku a 10 samostatně balených jednorázových aplikátorů.

Každý aplikátor je určen k jednorázovému použití. Neparférováno. Colpofix® je zdravotnický prostředek třídy IIa v souladu s požadavky směrnice 93/42/EHS v platném znění.

Výrobek nevyhazujte do záchoda ani do směsného odpadu. Zeptejte se lékárníka, jak máte likvidovat nepotřebné zdravotnické prostředky. Pomůžete tak chránit životní prostředí.

Datum poslední revize: září 2020



Uriach Italy, S.r.l. A SOCIO UNICO  
Assago Milanofiori, Str. 1, Palazzo F6 - 20057 Assago (MI)



XXXXXXXXXX